



POMPA BELMONT® RAPID INFUSER RI-2

Szybkie, niezawodne i bezpieczne
masywne toczenie krwi i płynów
- jednym przyciskiem.

RATUJEMY ŻYCIE. RAZEM.





WOJSKO



SALA
OPERACYJNA



SALA
PORODOWA
I PEDIATRIA



RATOWNICTWO
I INTENSYWNA
TERAPIA


„Belmont” daje pewność.

Wykorzystywana w najtrudniejszych sytuacjach od ponad 20 lat, pompa Belmont Rapid Infuser RI-2 zdobyła zaufanie lekarzy na całym świecie. Stanowi proste, bezpieczne i skuteczne rozwiązanie do masywnego toczenia i podgrzewania płynów. Pompa Belmont Rapid Infuser RI-2 to najlepszy sprzęt na najtrudniejsze sytuacje.

BEZ POWIETRZA. SZYBKO. NIEZAWODNIE.

Cechy produktu:

1. Funkcja odpowietrzania / recyrkulacji
2. Czujnik powietrza na wejściu
3. Pompa typu perystaltycznego o dużej prędkości
4. Czujnik temperatury płynu na wejściu
5. Wymiennik ciepła
6. Czujnik temperatury płynu na wyjściu
7. Wyświetlacz dotykowy
8. Czujnik ciśnienia / odpowietrzacz
9. Czujnik powietrza na wyjściu
10. Zastawka pacjenta / recyrkulacji

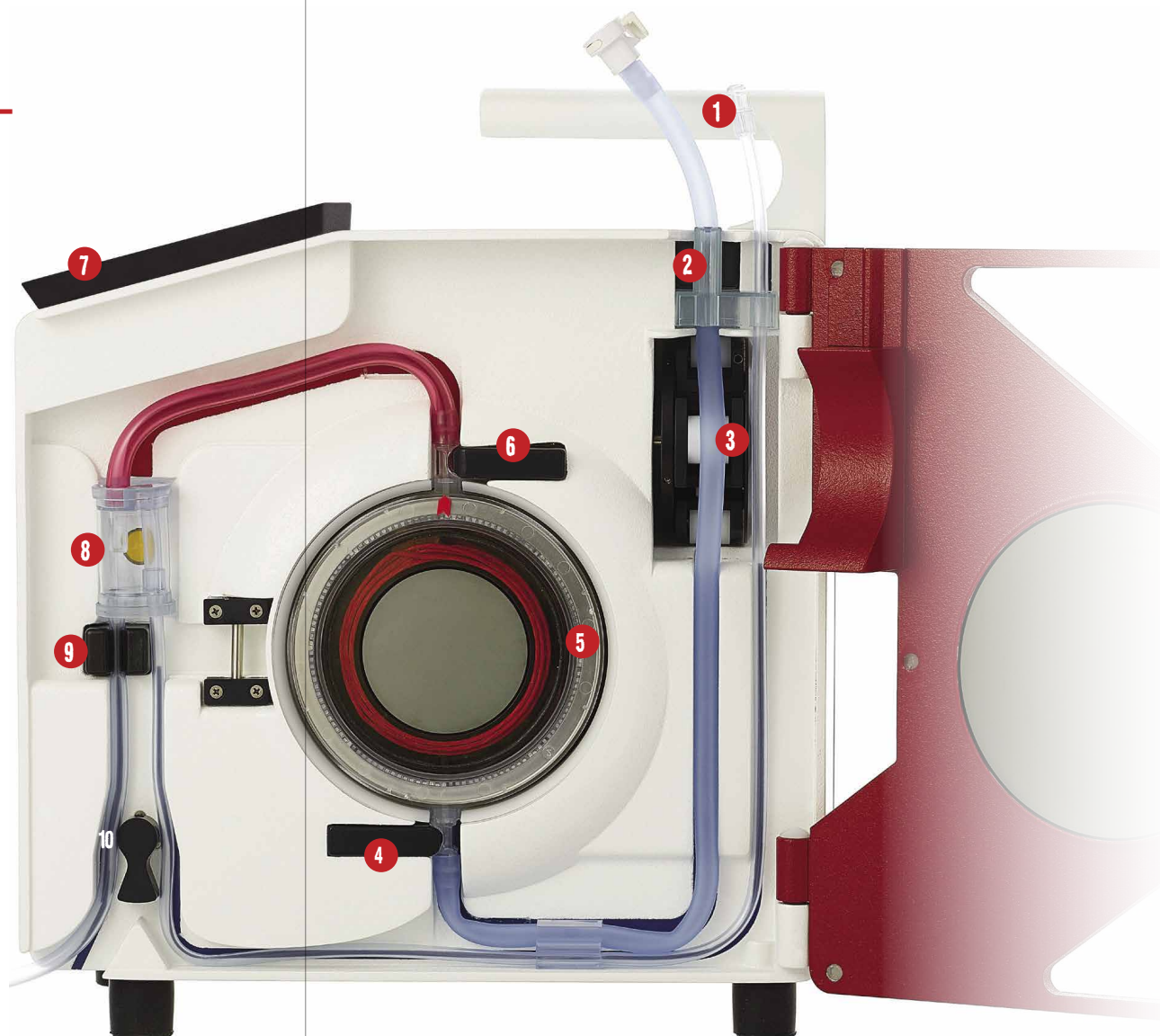

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE I USUWANIE POWIETRZA

Dwa ultradźwiękowe czujniki powietrza i zawór bezpieczeństwa zapewniają ochronę pacjenta przed zatorami powietrznymi.

AUTOMATYCZNE PRZEPOMPOWANIE

Pełne przepompowanie w mniej niż 1 minutę i łatwe ponowne przepompowanie bez odłączania pacjenta.

SZYBKĄ POMPA TYPU PERYSTALTYCZNEGO

Precyzyjna kontrola przetaczanego płynu z przepływem w zakresie od 2,5 do 1000 ml / min.

ELEKTROMAGNETYCZNE OGRZEWANIE INDUKCYJNE

Sucha, indukcyjna technologia grzewcza o dużej mocy i dwa czujniki IR temperatury zapewniają szybkie i precyzyjne podgrzewanie płynu w ciągu kilku sekund.

ZAAWANSOWANA REGULACJA CIŚNIENIA



Automatyczne monitorowanie ciśnienia i regulacja przepływu, gdy ciśnienie przekroczy 300 mmHg.

INTUICYJNY EKRAN DOTYKOWY

Wyświetlacz o wysokim kontraście zapewnia przejrzyste wyświetlanie instrukcji, alarmów i alertów oraz szybki dostęp do funkcji urządzenia.

WYŚWIETLANIE W CZASIE RZECZYWISTYM:

- Zadana prędkość toczenia
- Rzeczywista prędkość toczenia
- Całkowita objętość przetoczonych płynów
- Ciśnienie w układzie naczyniowym

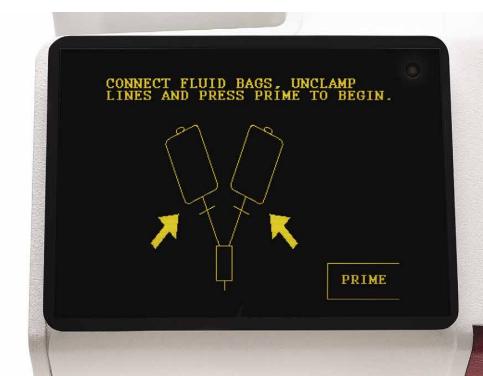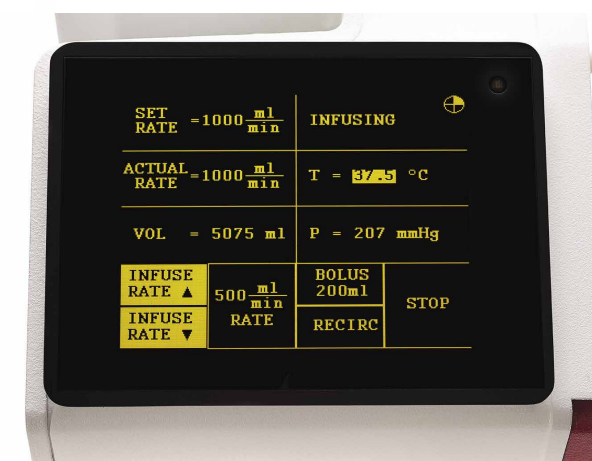

INFORMACJE O PRODUKCIE:

Pompa Rapid Infuser RI-2: 1000 ml/min

Prędkość przetaczania: 2,5 - 1000 ml/min

- USA: Model #903-00037 (120 V)
- Inne państwa: Model #903-00037A (230 V)

Pompa Rapid Infuser RI-2: 750 ml/min

Prędkość przetaczania: 2,5 - 750 ml/min

- USA: Model #903-00039 (120 V)
- Inne państwa: Model #903-00039A (230 V)
- NSN: 6515-01-661-8500 (120 V)

3-drenowy zestaw jednorazowy

Model #903-00006 (12 zestawów)

Model #903-00106 (6 zestawów)

3L zbiornik - 6 szt.

Model #903-00018

4x4 LVR – 4 zbiorniki 3L + 4 wymienniki ciepła

Model #903-00032

PLE przedłużenie linii pacjenta (1,37m) – 24 szt.


Model #903-00022

Rozdwojona linia pacjenta – 18 szt.

Model #903-00004



Wersja standardowa
120 ml zbiornik
(3-drenowy)

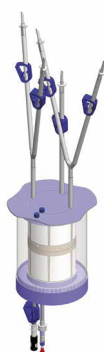

Wersja opcjonalna
3 l zbiornik
(5-drenowy)

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wymiary:

342,9 x 190,5 x 304,8 mm

Waga:

12,7 kg

Sposób przenoszenia:

Uchwyt do stojaka na kroplówkę, rączka na szczycie obudowy

Zasilanie:

115 V lub 220/240 VAC

Bateria:

Wbudowana, ładowalna do transportu. Obsługuje wszystkie funkcje z wyjątkiem grzania

Pompa do płynów:

Pompa perystaltyczna typu rolkowego.

Przepływ 2,5 - 1000 ml/min

Ogrzewacz:

Maksymalny pobór mocy 1440 W

Czujniki:

2 czujniki powietrza, czujnik ciśnienia, 2 czujniki temperatury (czujnik podczerwieni), czujnik prędkości przepływu, czujnik otwartej pokrywy, czujnik aktywacji zastawki

Komputer:

Wbudowany, steruje wszystkimi funkcjami, zabezpieczenie przed skutkami awarii oprogramowania

Wyświetlacz:

LCD, dotykowy, wodoodporny

Wymiary zewnętrzne: 14,8 x 10,4 cm

Aktywny obszar: 11,5 x 8,6 cm

Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych produktów, skontaktuj się z nami pod adresem sales@belmontmedtech.com.



OGRZEWANIE
PACJENTA



CHŁODZENIE
PACJENTA



ZARZĄDZANIE
PŁYNAMI



J. Posmyk Mil-Sys Sp. k.
Czerniowiecka 9/27
02-705, Warszawa
NIP: 525-258-7272
REGON: 147232541
KRS: 0000507428



www.paramedica-milsys.pl

780 BOSTON ROAD
BILLERICA, MA 01821, USA
USA: 866.663.0212
WORLDWIDE: +1 978.663.0212
FAX: 978.663.0214
WWW.BELMONTMEDTECH.COM

