

Komora izolacyjna IsoArk N 36-7/ N 36-7 ST

Do czasowej izolacji i transportu pacjentów zakaźnych



Zastosowanie:

Komora izolacyjna **IsoArk N 36-7** to idealne rozwiązanie do szybkiej izolacji i transportu skażonych przedmiotów lub osób potencjalnie zakaźnych do ośrodków leczniczych w celu wdrożenia bezpiecznego leczenia.

Komora izolacyjna jest wyposażona we własny system filtracji podciśnieniowej, aby zapewnić maksymalną ochronę i bezpieczeństwo operacyjne zarówno dla osoby zakażonej, jak i zespołu operacyjnego.



IsoArk N 36-7 jest dostępny w dwóch wersjach:

1. IsoArk N 36-7 Komora ze zintegrowanym systemem pasów do zabezpieczenia pacjenta
2. IsoArk N 36-7 ST Komora ze szczelinami umożliwiającymi użycie systemu pasów dostępnego na wózku do przewożenia chorych

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU:

- Ekonomiczny
- Szybki montaż
- Możliwość pełnego otwarcia w celu wygodnego umieszczenia pacjenta wewnątrz komory
- Wytrzymała i lekka konstrukcja
- Możliwość pełnego złożenia na czas przechowywania
- Minimalne wymagania dotyczące przechowywania
- Zintegrowane rękawy dostępu do pacjenta
- Zintegrowane porty użytkowe
- Dostępne różne rodzaje rękawic



Opis:

Montaż komory izolacyjnej IsoArk N 36-7 oraz przygotowanie do użycia zajmuje kilka minut. Urządzenie może pracować jako samodzielna jednostka rozstawiona bezpośrednio na podłodze lub być przymocowane do łóżka, stołu, wózka transportowego czy noszy.

IsoArk N 36-7 jest wyjątkowy pod względem zdolności do utrzymywania izolacji przy wielu pozycjach pacjenta, a także do zabezpieczenia pacjenta podczas transportu może wykorzystywać pasy z noszy czy wózka transportowego. Powietrze wchodzące do komory izolacyjnej IsoArk N 36-7 przechodzi przez pierwszy filtr HEPA, filtrując powietrze dla pacjenta, a następnie wydostaje się na zewnątrz przez kolejny filtr HEPA, zapobiegając rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń. Wlot powietrza jest zakryty specjalną przegrodą w celu zapobiegania zanieczyszczenia komory.

IsoArk N 36-7 umożliwia użytkownikowi elastyczność w zakresie stosowanych typów rękawic. Jednostka ma podwójną kieszeń zapinaną na suwak, która działa jak miniatura śluza powietrzna i umożliwia bezpieczne przenoszenie przedmiotów do komory (na przykład leków, dokumentów itp.) bez ryzyka rozprzestrzeniania zanieczyszczenia.

Dmuchawa jest wyposażona w zapasowy akumulator, który pozwala systemowi być niezależnym od zewnętrznego źródła zasilania do 10 godzin (przy pełnym naładowaniu). Dmuchawę można podłączyć do komory za pomocą paska. Wkład komory jest wykonany ze specjalnego materiału z wyjmowanym, aluminiowym wzmocnieniem.

IsoArk N 36-7 po każdej stronie ma cztery zintegrowane, zapinane na suwak portale na rękawice, umożliwiające wewnętrzny dostęp roboczy, gdy komora jest zamknięta, oraz kilka małych zapinanych na suwak portali zintegrowanych z wkładką, które można wykorzystać do infuzji, sprzętu cewnikowego itp. Gdy system nie jest używany, całość można łatwo zdemontować i złożyć.




Podstawa komory z wysoką krawędzią dla lepszego utrzymania płynu



Ośłona wlotu powietrza pozwala na ochronę filtra



Specjalny pas do podłączenia dmuchawy do komory

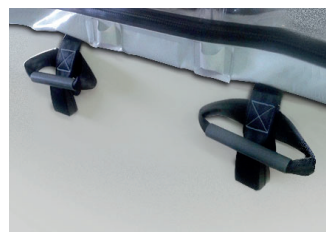

Uchwyty do podnoszenia w podstawie komory

Specyfikacja:

Numer produktu	IsoArk N 36-7: IsoArk N 36-7 ST:	B93100 B93101
Wysokość (W):	600	mm
Szerokość (S):	520	mm
Długość komory (D):	1980	mm
Całkowita długość z zamontowanym filtrem:	2270	mm
Wymiary torby do pakowania:	60 x 52 x 58 (DxSxW)	cm
Podciśnienie z działającą dmuchawą:	≥ 30	Pa
Przepływ powietrza:	36 (21)	m ³ /h (cfm)
Napięcie znamionowe:	230	VAC
Skuteczność filtracji przy wielkości cząstek 0,3 µm:	> 99,9995	%
Skuteczność filtracji przy wielkości cząstek 0,1 µm:	> 99,999	%
Pobór mocy:	50	VA
Czas pracy na akumulatorze:	do 10	godz.
Waga systemu:	~ 30	kg

ISOARCN36-6: 0420WER.01

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa, ul. Żolny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY:

- Gwarancja jakości zgodnie z AQAP 2110
- Kontrola jakości zgodnie z ISO 9001
- Skuteczność filtrów HEPA EN 1822 IEST-PR-CC001.3



J.Posmyk Mil-Sys Sp.k.

Czerniowiecka 9/27
02-705 Warszawa

biuro@paramedica-milsys.pl

662 721 408

www.paramedica-milsys.pl

NIP: 525-258-7272
REGON: 147232541
KRS: 0000507428

Beth-El Zikhron Yaaqov Industries Ltd.

1 Avshalom Road
Zikhron Yaaqov, Israel
Tel: + 972-4-629 9999
www.beind.com

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia